



Bedienungsanleitung für den Autohaler

**Anwendbar für die Präparate
BronchoSpray und Junik**

Automatisch richtig inhalieren ist kinderleicht mit dem Autohaler



Schritt 1

Drücken Sie den Vorsprung an der Schutzkappe und nehmen Sie die Schutzkappe ab.



Schritt 2

Drücken Sie den grauen Hebel hoch bis er einrastet. Halten Sie den Autohaler dabei aufrecht.



Schritt 3

Atmen Sie zunächst aus. Nehmen Sie das Mundstück in den Mund, atmen tief ein und halten den Atem einige Sekunden an.



Schritt 4

Drücken Sie den grauen Hebel wieder herunter und setzen Sie die Schutzkappe wieder auf.

Weitere Informationen zum Autohaler

Wie funktioniert der Autohaler?

- Mit dem Einatmen lösen Sie den Autohaler automatisch aus.
- Die Freisetzung des Wirkstoffes erfolgt immer zu Beginn des Einatmens.
- Der Autohaler setzt immer eine konstante Wirkstoffdosis frei.
- Nach dem Einatmen ertönt ein leises „Klack“; ein hörbares Signal für eine erfolgreiche Inhalation.

Wie wird der Autohaler gereinigt?

- Eine wöchentliche Reinigung mit einem trockenen Tuch ist ausreichend.
- Bitte beachten Sie:
 - Stecken Sie das zum Reinigen verwendete Tuch oder andere Gegenstände nicht in den Autohaler, da dies zu Beschädigungen am Gerät führen kann.
 - Bitte den Autohaler nicht auseinander nehmen oder mit Wasser spülen!



InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH

Von-Humboldt-Straße 1 · 64646 Heppenheim · Tel. 06252 95-7000 · Fax 06252 95-8844

www.infectopharm.com · kontakt@infectopharm.com