


Εύκολη χρήση:


Η εισπνοή με το Easyhaler® βήμα-βήμα.

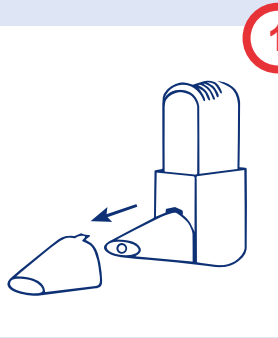

1

- Αφαιρέστε το καπάκι από το επιστόμιο


Ανακινήστε

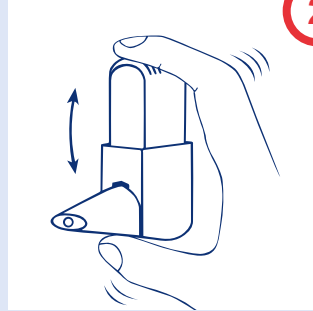

2

- Ανακινήστε καλά το Easyhaler® 3 έως 5 φορές


Ακούστε το κλικ

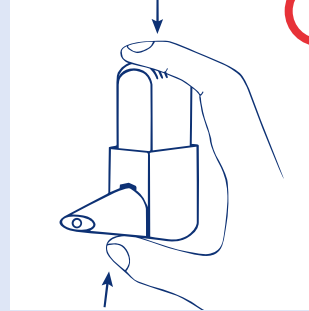

3

- Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση
- Πιέστε μία φορά με τον αντίχειρα και τον δείκτη, εωςότου ακουστεί ένα κλικ
- Στη συνέχεια αφήστε να επανέλθει στην αρχική θέση

Εισπνεύστε

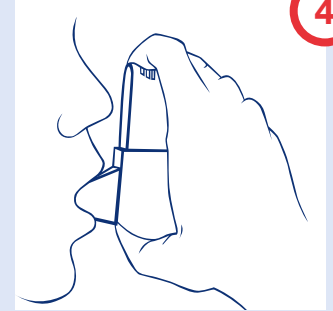

4

- Εκπνεύστε κανονικά (ΟΧΙ όμως στο Easyhaler®)
- Κρατήστε το Easyhaler® σφιχτά με τα χείλη σας
- Εισπνεύστε δυνατά και βαθιά από το Easyhaler®
- Απομακρύνετε τη συσκευή και κρατήστε την αναπνοή σας για 5 δευτερόλεπτα
- Τοποθετήστε το καπάκι στο επιστόμιο

Εάν χρησιμοποιείτε προστατευτικό κουτάκι

Το Easyhaler® ΔΕΝ πρέπει να αφαιρεθεί για την εισπνοή από το προστατευτικό κουτάκι.



- Ανοίξτε το προστατευτικό κουτάκι
- Αφαιρέστε το καπάκι από το επιστόμιο
- Εισπνεύστε όπως ακριβώς περιγράφεται στα βήματα 2 έως 4
- Τοποθετήστε το καπάκι στο επιστόμιο
- Κλείστε το προστατευτικό κουτάκι


Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης

Εάν...

- γεμίσατε το Easyhaler® κατά λάθος
- πιέσατε το Easyhaler® περισσότερο από μία φορά
- εκπνεύσατε στη συσκευή

Τότε...

- τινάζτε το Easyhaler® με το επιστόμιο επάνω στην επιφάνεια ενός τραπεζιού ή στο χέρι σας

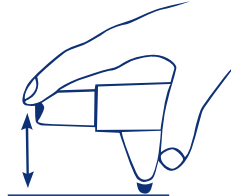


Εάν έχετε οδηγίες για περισσότερες από μία δόσεις ανά εφαρμογή, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

! Για να μειώσετε τον κίνδυνο μυκητιάσεων ξεπλύνετε το στόμα και το φάρυγγα με νερό ΧΩΡΙΣ να το καταπιείτε.

Ο μετρητής

Το Easyhaler® διαθέτει μετρητή, ο οποίος δείχνει πόσες δόσεις απομένουν.

- Μετά από κάθε 5η χρήση ο μετρητής προχωράει
- Η κόκκινη σήμανση σημαίνει ότι απομένουν ακόμη μόνο 20 δόσεις
- Όταν ο μετρητής δείξει 0, το Easyhaler® πρέπει να αντικατασταθεί

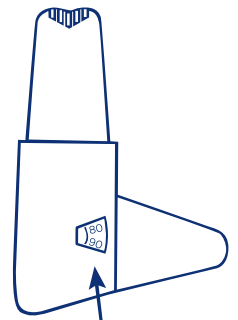

Βιντεάκι για τη σωστή εφαρμογή και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα www.easyhaler.de

 **Easyhaler®**

Εύκολα, αξιόπιστα, με απόλυτη ακρίβεια – κοντά στον ασθενή.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Αμβούργο
Τηλ. +49 (0) 40 89 96 89-0 Φαξ +49 (0) 40 89 96 89-96
info.hamburg@orionpharma.com
www.easyhaler.de www.orionpharma.de

**ORION
PHARMA**