


# Jednostavna primjena

## Inhalacija inhalatorom Easyhaler® korak po korak.


1

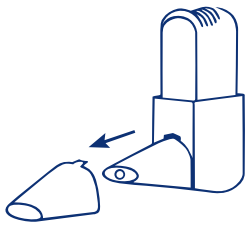

- poklopac skinite s usnika

### Protresite


2

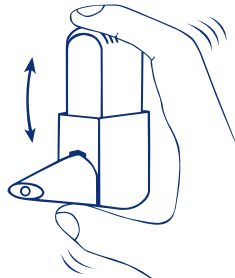

- Easyhaler® snažno protresite 3 do 5 puta

### Škljocnite


3

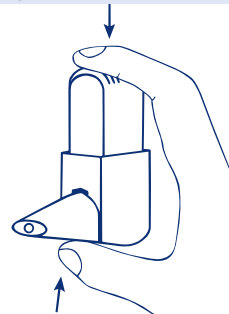

- uređaj držite okomito
- jedanput snažno stisnite palcem i kažiprstom sve dok ne začujete škljocaj
- zatim pustite da se vrati u početni položaj

### Inhalirajte

4

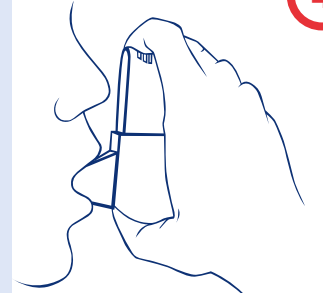


- normalno izdahnite (ali NE u Easyhaler®)
- Easyhaler® čvrsto obuhvatite usnama
- snažno i duboko udahnite kroz Easyhaler®
- uklonite uređaj i zadržite dah na 5 sekundi
- poklopac stavite na usnik

### Ako se koristite zaštitnom kutijom

Easyhaler® NE morate vaditi iz zaštitne kutije radi inhalacije.

- otvorite zaštitnu kutiju
- poklopac skinite s usnika
- inhalirajte kao što je opisano u koracima 2 do 4
- poklopac stavite na usnik
- zatvorite zaštitnu kutiju

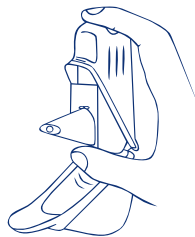


### U slučaju neuspjele primjene

U slučaju...

- da je Easyhaler® nehotice napunjen
- da je Easyhaler® aktiviran više od jedanput
- da ste izdahnuli u uređaj

Tada...

- Easyhaler® istresite usnikom na stol ili u svoju ruku

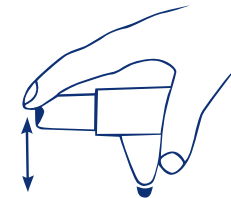


Ako je propisano više od jedne doze po primjeni, ponovite korake 2 do 4.

**!** Kako biste smanjili rizik od gljivične infekcije, usta i ždrijelo isperite vodom, a da je NE progutate.

### Stanje brojača

Easyhaler® ima brojač koji prikazuje koliko je još pojedinačnih doza ostalo.

- brojač se pomakne nakon svake 5. primjene
- crvena oznaka signalizira: ostalo je još samo 20 pojedinačnih doza
- kada je brojač na 0, valja zamijeniti Easyhaler®

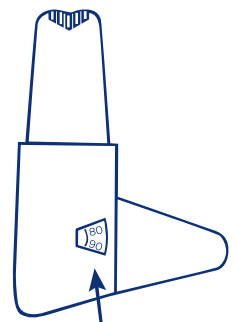

Film o pravilnoj primjeni i ostale informacije pronaći ćete na [www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de)

 **Easyhaler®**

Jednostavno, precizno, pouzdano – pacijentu za ljubav.

Orion Pharma GmbH Notkestraße 9 D-22607 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 89 96 89-0 Telefaks +49 (0) 40 89 96 89-96  
info.hamburg@orionpharma.com  
[www.easyhaler.de](http://www.easyhaler.de) [www.orionpharma.de](http://www.orionpharma.de)

**ORION  
PHARMA**