

Anwendungsinformation zum Pulmelia® Elpenhaler®



Den Verschluss auf der Vorderseite hochklappen, um das Aufbewahrungsfach zu öffnen. Einen Blisterstreifen entnehmen und das Aufbewahrungsfach wieder schließen.



Die transparente Schutzkappe seitlich vom Mundstück abheben. Danach das Mundstück mit leichtem Druck nach hinten klappen.



Den Blisterstreifen auf die Auflagefläche legen und das Loch des Blisterstreifens auf den Befestigungspunkt drücken. Das Näpfchen des Blisterstreifens sollte jetzt in die dafür vorgesehene Vertiefung passen. Die Erhebungen rechts und links sorgen zusätzlich dafür, dass sich der Blisterstreifen in der richtigen Position befindet.



Das Mundstück wieder schließen und das überstehende Ende des Blisterstreifens kräftig abziehen.

5



Den Pulmelia® Elpenhaler® vom Mund entfernt halten. Vollständig ausatmen und darauf achten, nicht in das Mundstück des Pulmelia® Elpenhalers auszuatmen. Den Pulmelia® Elpenhaler® zum Mund führen und die Lippen fest um das Mundstück schließen. Langsam und tief durch den Mund (nicht durch die Nase) einatmen, bis die Lunge gefüllt ist. Den Atem etwa 5 Sekunden oder so lange, wie es angenehm ist, anhalten und gleichzeitig den Pulmelia® Elpenhaler® aus dem Mund nehmen. Ausatmen und danach normal weiteratmen. Spülen Sie anschließend den Mund aus, um Pilzinfektionen zu vermeiden.

6



Das Mundstück wieder mit leichtem Druck nach hinten klappen. Es kann nun visuell kontrolliert werden, ob das gesamte Pulver inhaliert wurde. Der Blisterstreifen wird anschließend entsorgt.

Reinigen des Elpenhalers

- Nach jedem Gebrauch das Mundstück und die Auflagefläche mit einem trockenen Papier- oder sonstigen Tuch abwischen. Zum Reinigen des Pulmelia® Elpenhalers kein Wasser verwenden.

Mundstück schließen und transparente Schutz-

- kappe aufsetzen.

Mat.Nr.: P150816



ELPEN Pharma GmbH · Bismarckstraße 63 · 12169 Berlin-Steglitz
 info@elpen-pharma.de · www.elpen-pharma.de
 Tel.: +49 (0) 30 7974 040-0 · Fax: +49 (0) 30 7974 040-17



elpenhaler.tv