


## Einleitung

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung, bevor Sie den wiederverwendbaren STRIVERDI RESPIMAT zum ersten Mal anwenden.

Wenden Sie diesen Inhalator **einmal täglich** an. Inhalieren Sie bei jeder Anwendung nacheinander **2 Hübe**.

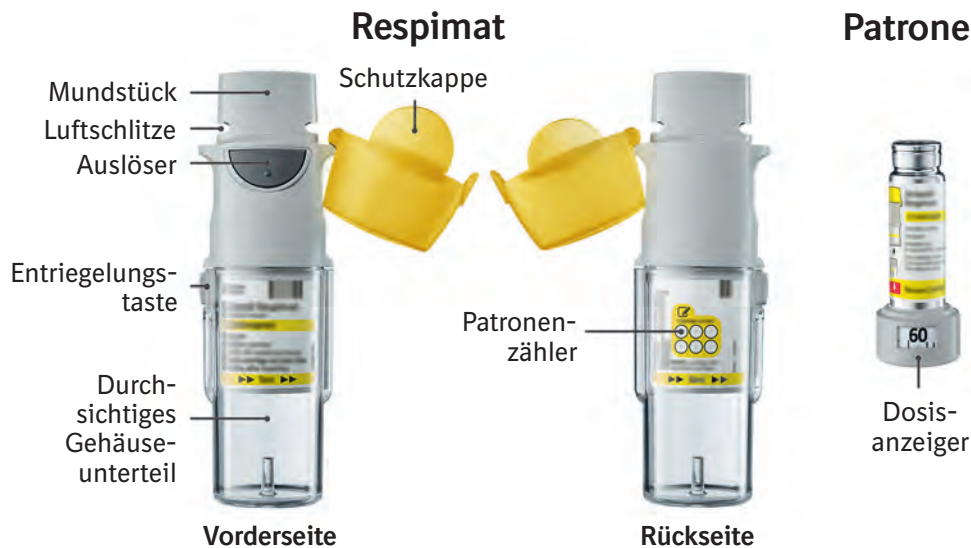

- Wenn Sie den STRIVERDI RESPIMAT länger als **7 Tage** nicht benutzt haben, müssen Sie zunächst einen Sprühstoß in Richtung Boden abgeben.
- Wenn Sie den STRIVERDI RESPIMAT länger als **21 Tage** nicht benutzt haben, müssen Sie die Schritte 4 bis 6 erneut ausführen, wie unter „Vorbereitung für die Anwendung“ beschrieben, bis eine sichtbare Sprühwolke austritt. Wiederholen Sie dann die Schritte 4 bis 6 noch weitere 3-mal.

## Pflege des wiederverwendbaren STRIVERDI RESPIMAT

Reinigen Sie das Mundstück einschließlich der Metalldüse im Inneren des Mundstücks mindestens einmal wöchentlich nur mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch.

Leichte Verfärbungen des Mundstücks haben keine Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des wiederverwendbaren STRIVERDI RESPIMAT Inhalators.

Falls erforderlich, kann die Außenseite des wiederverwendbaren STRIVERDI RESPIMAT Inhalators mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

## Wann muss der Inhalator ersetzt werden?

Spätestens wenn Sie einen Inhalator mit 6 Patronen nacheinander angewendet haben, müssen Sie sich eine neue Packung STRIVERDI RESPIMAT mit wiederverwendbarem Inhalator verschreiben lassen.



# Vorbereitung für die Anwendung

1

## Das durchsichtige Gehäuseunterteil abziehen

- Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe geschlossen ist.
- Drücken Sie auf die Entriegelungstaste und ziehen Sie gleichzeitig mit der anderen Hand das durchsichtige Gehäuseunterteil ab.



2

## Die Patrone einsetzen

- Schieben Sie die Patrone in den Inhalator.
- Drücken Sie den Inhalator auf einer stabilen Fläche **fest** nach unten, bis die Patrone **einrastet**.



3

## Anzahl verwendeter Patronen notieren

- Markieren Sie das erste bzw. nächste Kontrollkästchen auf dem Etikett des Inhalators, um die Anzahl der verwendeten Patronen nachzuverfolgen.
- Stecken Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil wieder so auf, dass es in die Entriegelungstaste **einrastet**.



4

## Drehen

- Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe geschlossen ist.
- Drehen Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil in Richtung der Pfeile auf dem Etikett bis es **einrastet** (eine halbe Umdrehung).



5

## Öffnen

- Öffnen Sie die Schutzkappe bis zum Anschlag.



6

## Auslösen

- Halten Sie den Inhalator mit der Öffnung in Richtung Boden.
  - Drücken Sie den Auslöser.
  - Schließen Sie die Schutzkappe.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 so oft, bis eine **sichtbare Sprühwolke** austritt.
- **Wiederholen** Sie dann die Schritte 4 bis 6 noch **weitere 3-mal**.

Der Inhalator ist nun für die Anwendung bereit und wird 60 Hübe (30 Dosen) abgeben.



# Tägliche Anwendung

## DREHEN

- Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe geschlossen ist.
- Drehen Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil in Richtung der Pfeile auf dem Etikett bis es **einrastet** (eine halbe Umdrehung).



## ÖFFNEN

- Öffnen Sie die Schutzkappe bis zum Anschlag.



## AUSLÖSEN

- Atmen Sie langsam und vollständig aus.
- Umschließen Sie das Mundstück mit den Lippen, ohne die Luftschlitze zu verdecken. Halten Sie den Inhalator waagrecht in Richtung Rachen.
- Atmen Sie **langsam** und tief durch den Mund ein, drücken Sie gleichzeitig den Auslöser und atmen Sie weiter langsam ein, solange es nicht unangenehm wird.
- Halten Sie den Atem möglichst 10 Sekunden lang an oder solange, dass es nicht unangenehm wird.
- Wiederholen Sie die Schritte „Drehen“ - „Öffnen“ - „Auslösen“ einmal, um den 2. Hub zu inhalieren.
- Schließen Sie die Schutzkappe bis zum nächsten Gebrauch des Inhalators.



## Wann muss die STRIVERDI RESPIMAT Patrone ausgetauscht werden?

Der Dosisanzeiger gibt an, wie viele Hübe noch in der Patrone vorhanden sind.



Noch 60 Hübe.



Weniger als 10 Hübe. Halten Sie eine neue Patrone bereit.



Die Patrone ist leer. Drehen Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil, dabei löst es sich ab. Der Inhalator ist nun gesperrt. Ziehen Sie die leere Patrone aus dem Inhalator. Setzen Sie eine neue Patrone ein und gehen Sie weiter vor, wie oben ab Schritt 2. „Die Patrone einsetzen“ beschrieben.

# Antworten auf häufige Fragen

<p><b>Die Patrone lässt sich nicht tief genug in das Gehäuse einsetzen</b></p>	<p><b>Der Auslöser lässt sich nicht drücken</b></p>	<p><b>Das durchsichtige Gehäuseunterteil lässt sich nicht drehen oder nicht wieder aufstecken</b></p>
<p><b>Haben Sie vor dem Einsetzen der Patrone aus Versehen das durchsichtige Gehäuseunterteil gedreht?</b> Öffnen Sie die Schutzkappe, drücken Sie den Auslöser und setzen Sie dann die Patrone ein.</p> <p><b>Handelt es sich um einen Patronenwechsel?</b> Die Zweite und weitere Patronen ragen weiter aus dem Inhalator-Gehäuse heraus als die allererste Patrone. Schieben Sie die Patrone in den Inhalator bis sie einrastet. Stecken Sie dann das durchsichtige Gehäuseunterteil wieder auf.</p>	<p><b>Haben Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil gedreht?</b> Falls nein, drehen Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil in einer gleichmäßigen Bewegung bis es einrastet (eine halbe Drehung).</p> <p><b>Zeigt der Dosisanzeiger auf der Patrone einen weißen Pfeil auf rotem Hintergrund?</b> Die Patrone ist leer. Setzen Sie eine neue Patrone ein.</p> <p><b>Die leere Patrone lässt sich nicht entfernen</b></p>	<p><b>Haben Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil schon gedreht?</b> Falls ja, folgen Sie den Anweisungen „Öffnen“ und „Auslösen“ unter der Überschrift „Tägliche Anwendung“.</p> <p><b>Hat sich das durchsichtige Gehäuseunterteil gelöst und zeigt der Dosisanzeiger auf der Patrone einen weißen Pfeil auf rotem Hintergrund?</b> Die Patrone ist leer. Setzen Sie eine neue Patrone ein.</p>
<p><b>Der wiederverwendbare Respiamat ist zu schnell leer geworden</b></p>	<p><b>Der wiederverwendbare Respiamat sprüht nicht</b></p>	<p><b>Der wiederverwendbare Respiamat sprüht von allein</b></p>
<p><b>Haben Sie den wiederverwendbaren Respiamat wie vorgesehen angewendet (2 Hübe einmal täglich)?</b> Bei 2 Hüben einmal täglich reicht der Respiamat 30 Tage lang.</p> <p><b>Haben Sie öfter in die Luft gesprüht, um die Funktionsfähigkeit des wiederverwendbaren Respiamat zu testen?</b> Sobald Sie den wiederverwendbaren Respiamat für die Anwendung vorbereitet haben, ist bei täglicher Anwendung kein Sprühtest nötig.</p>	<p><b>Haben Sie eine Patrone eingesetzt?</b> Falls nein, setzen Sie eine Patrone ein. Der wiederverwendbare Respiamat darf nach Einsetzen der Patrone und Aufstecken des durchsichtigen Gehäuseunterteils nicht mehr auseinander genommen werden, bevor die Patrone leer ist.</p> <p><b>Haben Sie die Schritte „Drehen“ - „Öffnen“ - „Auslösen“ nach dem Einsetzen der Patrone mindestens 3-mal ausgeführt?</b> Wiederholen Sie diese Schritte nach dem Einsetzen der Patrone mindestens 3-mal, wie oben in den Schritten 4 bis 6 unter der Überschrift „Vorbereitung für die Anwendung“ angegeben.</p> <p><b>Zeigt der Dosisanzeiger auf der Patrone einen weißen Pfeil auf rotem Hintergrund?</b> Die Patrone ist leer. Setzen Sie eine neue Patrone ein.</p>	<p><b>War die Schutzkappe offen, als Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil gedreht haben?</b> Schließen Sie erst die Schutzkappe und drehen Sie dann das durchsichtige Gehäuseunterteil.</p> <p><b>Haben Sie auf den Auslöser gedrückt, während Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil gedreht haben?</b> Schließen Sie die Schutzkappe, sodass der Auslöser abgedeckt ist, und drehen Sie dann das durchsichtige Gehäuseunterteil.</p> <p><b>Haben Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil nicht bis zum Einrasten gedreht?</b> Drehen Sie das durchsichtige Gehäuseunterteil in einer gleichmäßigen Bewegung bis es einrastet (eine halbe Drehung).</p> <p><b>War die Schutzkappe offen, als Sie die Patrone gewechselt haben?</b> Schließen Sie erst die Schutzkappe und setzen Sie dann eine neue Patrone ein.</p>